

Étape 3 : Retirer la bague

7



Pour commencer le retrait, appliquez 2 pulvérisations de lubrifiant et faites tourner la bague pour répartir le lubrifiant en dessous.

8



La première technique de retrait, la plus efficace, est la « technique du tire-bouchon ». Il suffit de faire tourner la bague en tire-bouchon le long du doigt. Procédez lentement et doucement.

9



La technique suivante est le « basculement ». Il s'agit de placer le pouce sur la partie inférieure de la bague et deux doigts sur la partie supérieure de la bague, puis de faire glisser la bague le long du doigt.

10



Si la peau est comprimée, vous pouvez exercer une contre-traction avec votre main non dominante pour tirer la peau relâchée, tout en continuant à « basculer » la bague le long du doigt.

Étape 4 : Conseils d'experts

- Vous pouvez effectuer jusqu'à quatre séries de 5 minutes de compression pour réduire la taille des doigts. Même si plus de compression ne blessa pas le doigt, il y a un rendement décroissant au-delà de 4 séries. Il est plus efficace d'effectuer toutes les séries de compression avant de commencer le retrait.
- En cas de plusieurs cycles de compression, il est important de dégonfler le dispositif et de lui donner un quart de tour entre les cycles pour s'assurer que le doigt est comprimé de manière uniforme.

Étape 5 : Nettoyer l'appareil

Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil avec des lingettes d'alcool isopropylique à 70 % ou de peroxyde d'hydrogène accéléré à 0,5 % et remettez-le dans son étui.



Balayez pour commander plus de lubrifiant pour bague



Balayez pour inscrire votre trousse Ring Rescue



Balayez ici pour visualiser les vidéos de formation

 **RingRescue**

Des questions? Communiquez avec nous à l'adresse : info@ringrescue.com
ringrescue.com/help



 **RingRescue**

Dispositif de compression


A

Guide de démarrage rapide


RDC01-PO29-V01



Description du produit

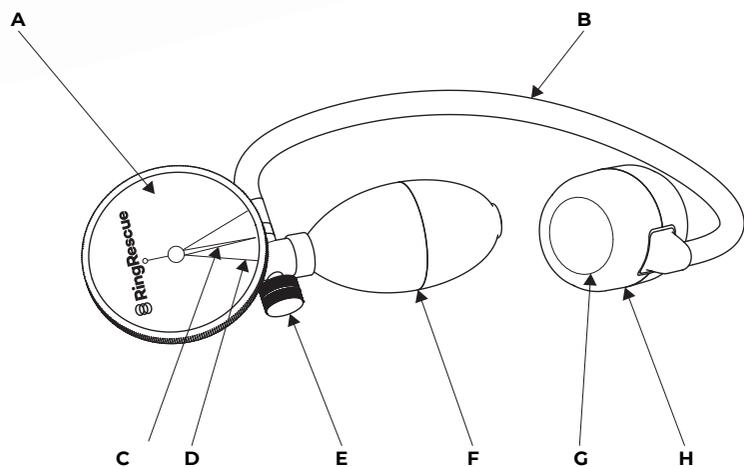

- A - Face de la jauge
- B - Tuyau
- C - Aiguille indicatrice de pression
- D - Zone cible de pression suggérée
- E - Soupape de surpression
- F - Poire
- G - Vessie interne
- H - Manchette pour le doigt

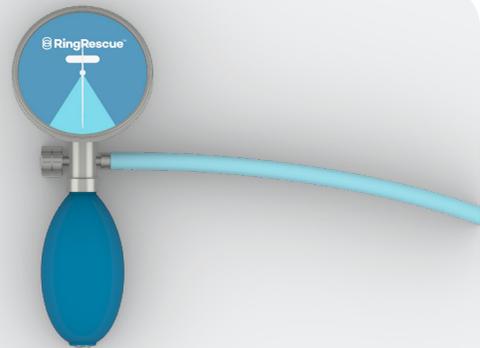


Le dispositif de compression de Ring Rescue est une solution non destructive pour le retrait des bagues coincées.

Le dispositif rétrécit temporairement la taille du doigt pour permettre au professionnel de retirer la bague sans l'abîmer. Ce dispositif est plus efficace lorsque la bague est coincée depuis 5 jours ou moins.






Si vous préférez les instructions vidéo, balayez le code QR à gauche ou visitez ringrescue.com/tutorial pour visionner la vidéo de formation.

Étape 1 : Pour commencer

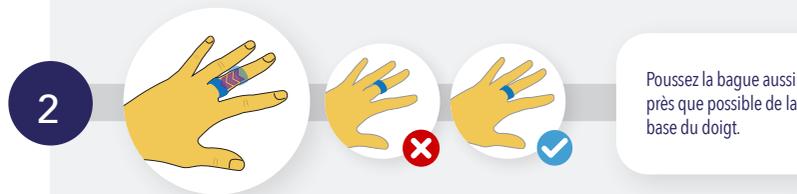

Étape 2 : Comprimer le doigt

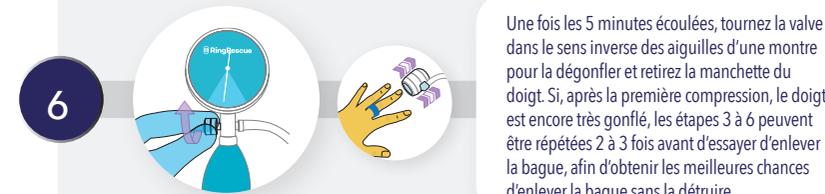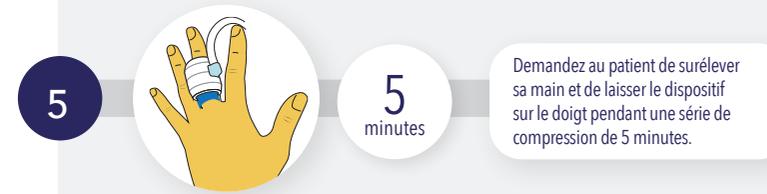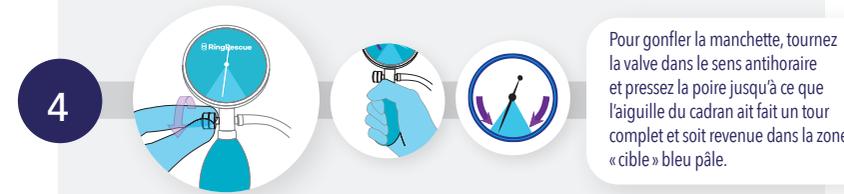

Les instructions se poursuivent au verso.