

Ring Rescue^{MD} | Dispositif de compression^{MC}

Référence technique



Ring Rescue^{MD} | Dispositif de compression^{MC}

REF RDC-A1-UC

Numéro FEI : 3015542886

Numéro LEIM de Santé Canada : 9115

Brevet aux États-Unis : 10 702 282



Ring Rescue Inc.
20, Orion Court
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
Canada
B2Y 4W6
1 888 640-7464
ringrescue.com



 Fabriqué au Canada avec des pièces nationales et importées

Introduction

Cette référence technique représente les connaissances les plus récentes relatives à l'utilisation sûre et efficace du Dispositif de compression^{MC} de Ring Rescue^{MD}. Ce manuel est destiné aux formateurs et formatrices, aux infirmiers et infirmières, aux médecins ainsi qu'aux techniciens et techniciennes. Conservez toujours un exemplaire de ce manuel afin de pouvoir le consulter pendant toute la durée de vie du produit.

Avant d'utiliser ce produit, veuillez consulter la *Guide de démarrage rapide* fourni et vous familiariser avec son fonctionnement en visionnant les vidéos d'instruction à :

ringrescue.com/tutorial

ou en balayant le code QR ci-dessous et en regardant les vidéos d'instruction.



Contexte

Le Dispositif de compression^{MC} de Ring Rescue^{MD} utilise la pression de l'air pour comprimer temporairement un doigt gonflé, ce qui permet de retirer une bague coincée sur le doigt. Des techniques de retrait de bague sont alors nécessaires pour l'enlever.

Instructions d'utilisation

Le Dispositif de compression^{MC} de Ring Rescue^{MD} est préconisé lorsqu'une bague est coincée sur un doigt (piégeage de la bague), et qu'il est souhaitable de la retirer. Le dispositif, associé à de bonnes techniques de retrait de bagues, permet souvent de retirer les bagues coincées.

Mode d'emploi

Avant d'utiliser ce produit, veuillez consulter la *Guide de démarrage rapide* du Dispositif de

compression^{MC} de Ring Rescue^{MD} ainsi que les vidéos d'instruction offertes sur :

ringrescue.com/tutorial

Contre-indications d'utilisation

Ne pas utiliser si les doigts sont gravement blessés.

Définitions

Les symboles figurant sur l'équipement ou l'étiquetage sont définis dans cette section ou dans le *tableau de définition des symboles*. Consultez le *tableau de définition des symboles* fourni avec l'appareil.

Symbole	Définition
	Indicateur d'avertissement général
	Lisez les instructions avant d'utiliser le produit

Mise en garde

La durée totale de la compression ne doit pas dépasser 15 minutes. Consultez un médecin qualifié si vous soupçonnez la présence d'une fracture de l'os du doigt, d'une lésion nerveuse ou vasculaire, d'une lacération ou d'une lésion de la peau, ou d'une lésion des ligaments et des tendons.



Avertissement

N'utilisez Ring Rescue^{MD} qu'avec des accessoires et des composants approuvés (tels que le Lubrifiant pour bagues^{MC} de Ring Rescue^{MD}) avec ce produit. Ne modifiez PAS ce produit ou les accessoires qui l'accompagnent de quelque manière que ce soit. Toute modification de cet appareil ou de ses accessoires annule la garantie et peut entraîner des dommages.

Instructions de nettoyage

Avant et après chaque utilisation, nettoyez l'appareil et ses composants avec des lingettes d'alcool à 70 % ou de peroxyde d'hydrogène accéléré à 0,5 %. N'utilisez pas d'autres produits chimiques ou substances de nettoyage. N'immergez aucun composant dans un liquide. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou aux rayons ultraviolets.

Il est recommandé d'appliquer un gant médical sur la main affectée pendant l'utilisation du dispositif afin de préserver la propreté.

Tutoriels

Balayez le code QR ou visitez le lien ci-dessous pour obtenir des vidéos d'instruction sur le coupe-bague Dolphin^{MC} de Ring Rescue :



ringrescue.com/tutorial

Expiration du produit


Consultez l'étiquette du produit, située au dos de la jauge, pour connaître les informations relatives à la fabrication et à la péremption du dispositif.

Garantie

Lorsqu'il est utilisé et entretenu conformément à toutes les instructions fournies, si le Dispositif de compression^{MC} de Ring Rescue^{MD} présente une défaillance due à un défaut de matériau ou de fabrication dans un délai d'un (1) an à compter de la date d'achat au détail d'origine, le produit sera réparé ou remplacé à la discrétion de Ring Rescue Inc. sans frais supplémentaires. Cette garantie ne couvre pas les tentatives infructueuses de retrait de la bague. Pour plus de détails, consultez

www.ringrescue.com/warranty

Description du produit

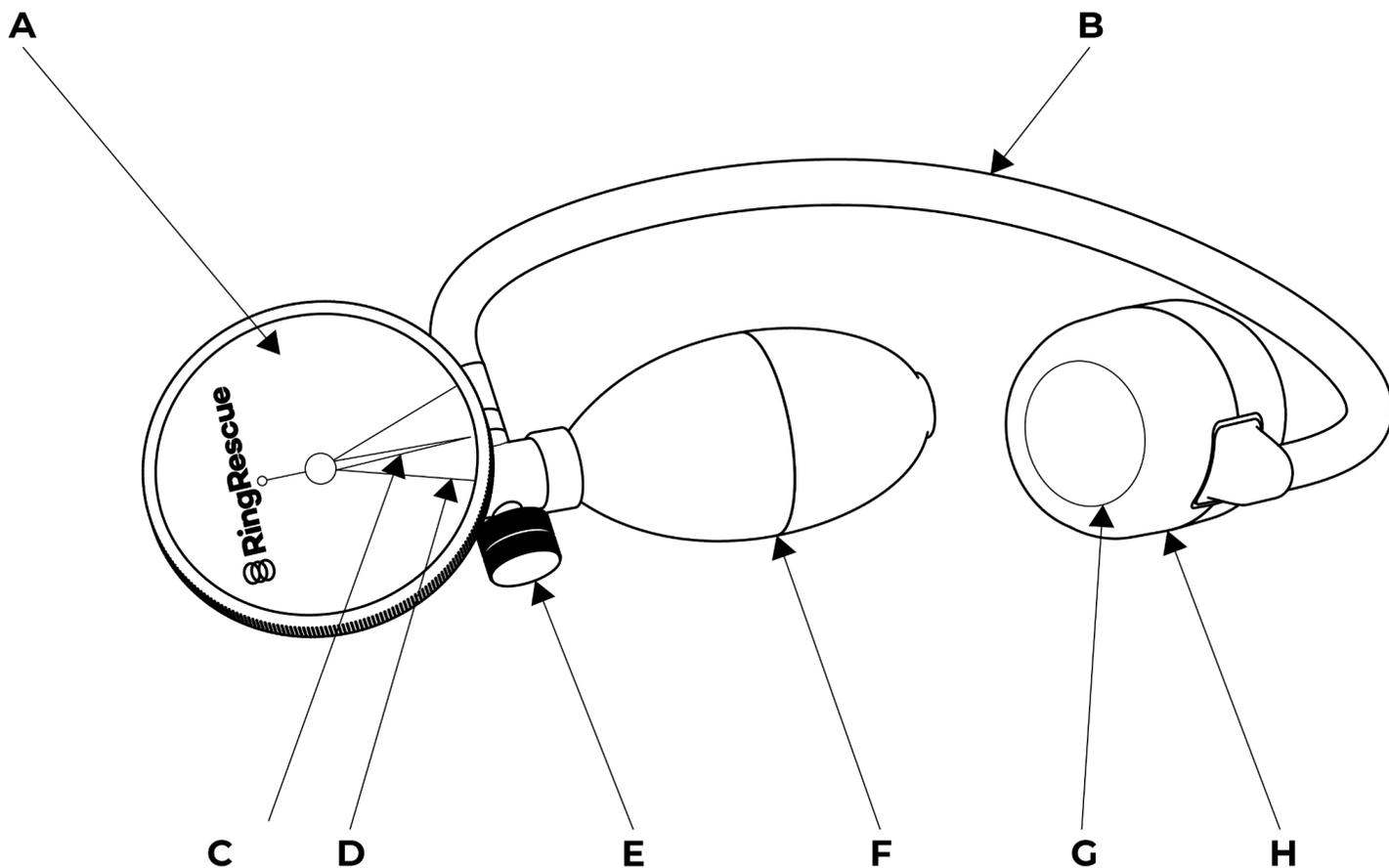

A	Face de la jauge
B	Tuyau
C	Aiguille indicatrice de pression
D	Zone de pression suggérée
E	Soupape de surpression
F	Poire
G	Vessie interne
H	Manchette pour le doigt

Spécifications

Avertissement

Consultez TOUJOURS l'étiquette accompagnant les accessoires pour obtenir des instructions sur l'utilisation et le stockage appropriés.

Mise en garde

Stockez TOUJOURS cet équipement dans les limites environnementales précisées dans ce manuel.

Remarque

Les spécifications sont approximatives et peuvent varier d'un appareil à l'autre.



Modèle :	Dispositif de compression ^{MC} de Ring Rescue ^{MD} RDC-A1-UC
Masse :	0,23 kg (0,51 lb)
Diamètre maximal du doigt :	25,5 mm (1,0 po)

Conditions environnementales :

Fonctionnement

Transport et stockage



Limite de température ambiante

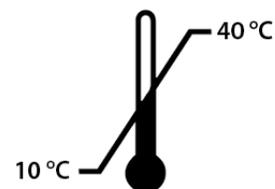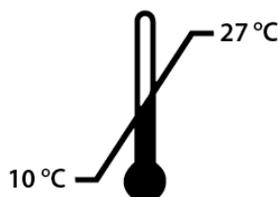

Humidité relative



Pression atmosphérique

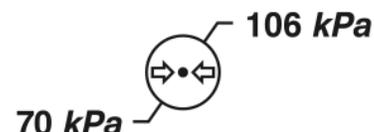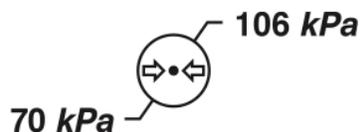

Historique des révisions**NE PAS IMPRIMER CETTE PAGE.**

Version	Date	Détails	Nom
RDC01-P030-V01	19/12/2022	Version initiale	P. Hennessey

NE PAS IMPRIMER CETTE PAGE