

Étape 4 : Nettoyage et recharge

13



6

Avant de replacer le coupe-bague dans l'étui, nettoyez la rainure du **protège-doigt** à l'aide de l'outil de nettoyage fourni.

14

Nettoyez l'appareil avec des lingettes d'alcool isopropylique à 70 % ou de peroxyde d'hydrogène accéléré à 0,5 %.

15




Après le nettoyage, branchez le coupe-bague et rechargez-le pour la prochaine utilisation.

Dépannage et indicateurs



- **Ne forcez PAS** le disque de coupe dans la bague. Laissez le coupe-bague couper **automatiquement**.
- Évitez les mouvements excessifs pendant la coupe.
- **N'utilisez PAS** les **boutons d'ouverture et de fermeture** pendant la coupe.

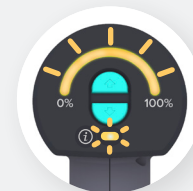


Usage inapproprié (orange clignotant)

10 secondes

Les voyants orange indiquent un usage inapproprié. Si les **voyants orange** clignotent, arrêtez la coupe et résolvez le problème. Le coupe-bague cessera de couper pendant 10 secondes si un usage inapproprié persiste. La coupe peut continuer une fois que les **voyants orange** se sont éteints.

Exemples possibles d'usage inapproprié :

- Lubrification insuffisante
- Déplacement ou mouvement du coupe-bague pendant la coupe
- Disque de coupe forcé dans la bague

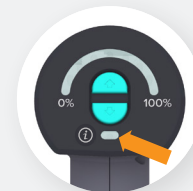

Le **voyant d'état** affiche l'état du coupe-bague :

- » Le coupe-bague est prêt à l'emploi
- » Usage inapproprié (voir ci-dessus)
- » Appliquez du lubrifiant
- » Batterie très faible (branchez le coupe-bague)

Lorsque la batterie devient très faible, l'appareil désactive la **gâchette**, mais permet toujours aux **boutons d'ouverture et de fermeture** de fonctionner. Branchez l'appareil pour activer immédiatement la **gâchette**.



Balayez pour commander plus de lubrifiant pour disques AssureCUT^{MC} et bagues.



Balayez pour inscrire votre trousse Ring Rescue



Cliquez ici pour visualiser les vidéos de formation

 **RingRescue**

Des questions? Communiquez avec nous à l'adresse :
info@ringrescue.com
ringrescue.com/help



RDD01-P083-V01


Guide de démarrage rapide




 **RingRescue** | **Dolphin**
Ring Cutter

B

Description
du produit

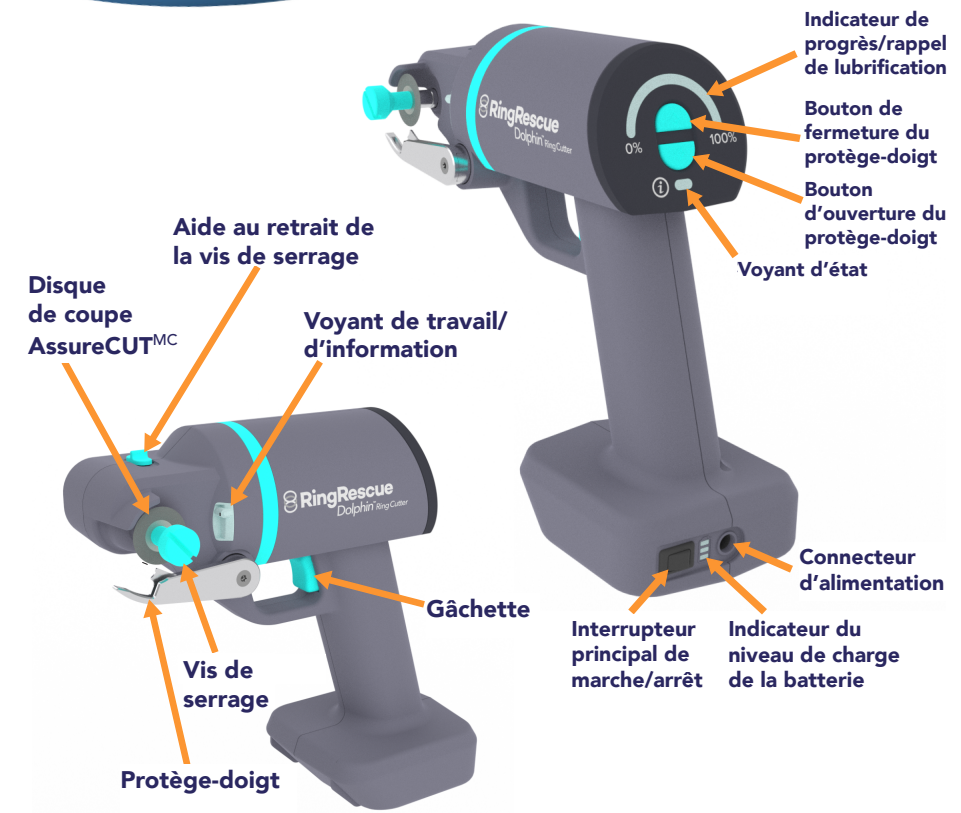

Vidéo de formation

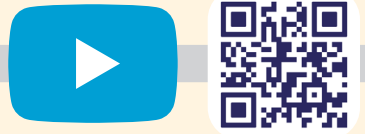

Balayez le code QR ou visitez ringrescue.com/tutorial pour regarder la vidéo de formation.

Étape 1 : Configuration et démarrage

Attention!

Surveillez régulièrement la température de la bague pendant la coupe. Si la bague est chaude, ajoutez du lubrifiant ou interrompez la coupe. Utilisez uniquement le coupe-bague à une température ambiante comprise entre 10 et 25 °C (50 et 77 °F).

Ne touchez pas le disque de coupe pendant le fonctionnement.

1 Allumez le coupe-bague

2 Tenez enfoncé le bouton d'ouverture pour ouvrir le protège-doigt.

3 Utilisez un disque AssureCUT^{MC} neuf pour chaque patient.

Pour installer un disque neuf :

- Retirez la vis de serrage
- Installez le disque
- Remettez en place la vis de serrage fermement (à la main)

Si la batterie est faible, le coupe-bague peut être utilisé branché.

Tenez enfoncé le bouton d'ouverture pour ouvrir le protège-doigt.

Utilisez un disque AssureCUT^{MC} neuf pour chaque patient.

Étape 2 : Opération de coupe de la bague

4 Placez la main du patient et le coupe-bague sur une surface plane et stable. Une coupe de bague prend environ **3 à 6 minutes**.

Le coupe-bague peut couper des bagues jusqu'à la taille 13,5 (américaine). Pour obtenir des conseils sur la coupe de bagues peu communes, consultez la référence technique.

5 Insérez le **protège-doigt** sous la bague jusqu'à ce que la bague touche l'arrière du protège-doigt.

Tenez enfoncé le **bouton de fermeture** pour fermer le **protège-doigt** jusqu'à ce que le disque touche la bague.

6 Appliquez deux pulvérisations de **lubrifiant pour bague** directement sur le disque de coupe avant de commencer la coupe.

7 Appuyez sur la **gâchette** pour commencer la coupe. Le coupe-bague coupe la bague **automatiquement!** Surveillez votre progression avec l'**indicateur de progrès**.

8 Le **rappel de lubrification** clignotera périodiquement en **bleu** pendant la coupe. Appliquez deux pulvérisations de **lubrifiant pour bague** sur le disque lorsque cela est indiqué. Vous pouvez continuer la coupe tout en appliquant le **lubrifiant pour bague**.

Étape 3 : Effectuer une coupe

9 Prévoyez un temps de coupe de **3 à 6 minutes** pour les bagues de taille standard.

10 L'**indicateur de progrès** clignotera en **vert** lorsque la coupe est terminée. Tenez enfoncé le **bouton d'ouverture** pour retirer le **protège-doigt** depuis le dessous de la bague.

11 La plupart des bagues nécessitent **deux coupes** pour être retirées. Tournez la bague de 180° et répétez les étapes 5 à 10.

12 Une fois la bague retirée, jetez le disque usagé. **Les disques AssureCUT^{MC} sont à usage unique.**

Élimination des objets tranchants

2 Les disques AssureCUT^{MC} sont à **USAGE UNIQUE**.

Les instructions se poursuivent au verso